



# Guide rapide de mise en oeuvre du walk200b package

## 1 – Installation du Logiciel

- Insérer le CD d'installation du Cube (1) dans le lecteur du PC et lancer le programme d'installation (**Setup.exe**); les droits administrateur système du PC sont nécessaires pour cette exécution;
- Le redémarrage du PC peut être nécessaire après l'exécution de ce logiciel d'installation;
- Installer le périphérique Bluetooth sur un port USB disponible (3), et attendre l'installation automatique lancée à partir de Windows.


## 2 – Preparation du boîtier enregistreur et liaison Bluetooth

- Ouvrir le couvercle de l'enregistreur (2) et insérer les batteries (5), dans l'espace prévu à cet effet puis refermer;
- Allumer l'enregistreur (2) en pressant le contacteur , puis attendre que l'horloge apparaisse sur l'écran du boîtier (2);
- Presser durant 5 secondes le bouton  pour activer la connexion Bluetooth; sur le petit écran de l'enregistreur doit apparaître le symbole **BT**;
- Sur le **PC** cliquer l'icône Bluetooth, sélectionner «**Ajouter un périphérique**» puis entrer le code de jumelage **6624** (voir illustrations de droite);
- Attendre que Windows complète l'installation, cliquer de nouveau sur l'icône Bluetooth de Windows, sélectionner «**Ouvrir les paramètres**» puis l'onglet «Ports COM»;
- Noter les références du **port COM sortant**;

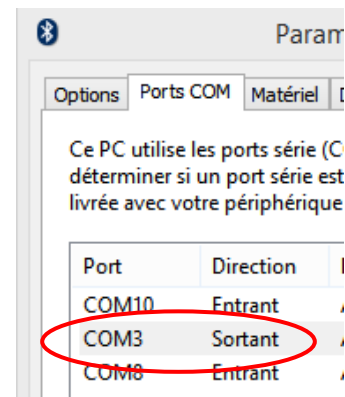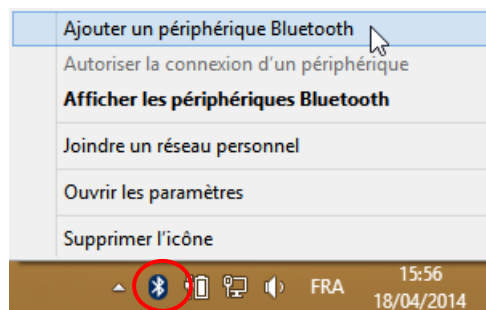


### 3 – Avvio della registrazione


- Activer le Bluetooth sur l'enregistreur en pressant le bouton  durant 5 secondes;
- Sur le PC, lancer le logiciel CUBE, cliquer le rectangle **«Nouvel Examen»**, sélectionner **«ABPM»** et suivre la guide de procédure;

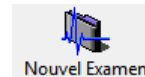

- Sur requête du logiciel, cliquer sur la touche **«Add COM port»** puis sur la touche **«Retry»**;
- Le nom à entrer ici, est la référence du **«port COM sortant»** notée à l'étape précédente pour le couplage BT;
- Disposer le brassard au bras du patient;
- Insérer l'enregistreur dans l'étui (8), et brancher le tube du brassard sur l'embout de l'enregistreur;
- Presser le bouton ci-dessous pour lancer une mesure manuelle; 
- Vérifier à l'écran l'affichage des valeurs de cette première mesure; si aucun message d'erreur n'apparaît, l'enregistrement sera lancé automatiquement;

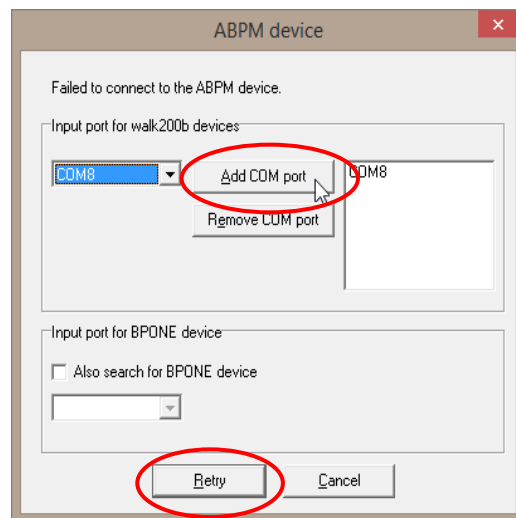


- Placer l'enregistreur à la ceinture du patient en glissant la ceinture élastique (7) dans l'étui de protection (8) et veiller à ce que le tube reste bien branché et qu'il ne soit ni pincé ni vrillé.

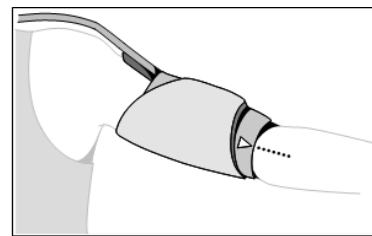

**Note:** les instructions en rouge ne sont requises que lors de la première utilisation.

### 4 – Téléchargement et ouverture d'un examen

- A l'issue de l'enregistrement, afin de charger les données d'examen sur le logiciel **CUBE**, retirer l'enregistreur de la ceinture du patient;
- Activer la liaison Bluetooth sur l'enregistreur en appuyant la touche  pendant 5 secondes;
- Ouvrir l'application **CUBE**, entrer le nom de l'utilisateur **MED1** et le password **MED1**;
- Cliquer l'icône **«Nouvel Examen»**, sélectionner ABPM et suivre la procedure;

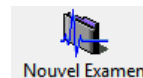

- Après avoir téléchargé les données d'examen dans le CUBE, faire un double-click sur le nom du patient, sélectionner un examen particulier sur la liste apparaissant dans la fenêtre de droite et faire de nouveau un double-click pour le sélectionner et l'ouvrir.
- Nom d'utilisateur et mot de passe peuvent être modifiés à votre guise.

